



## Einrichtung eines Meta Quest VR-Headsets

*Diese Einrichtung ist kompatibel mit:*

- Meta Quest 2
- Meta Quest 3
- Meta Quest 3S
- Meta Quest Pro

1. Sie erhalten innerhalb von **24 bis 72 Stunden nach Ihrer Anmeldung** eine E-Mail von Meta. Bitte überprüfen Sie regelmäßig Ihr E-Mail-Postfach.
2. In der E-Mail von Meta klicken Sie auf den Link „**Setup your account**“.
3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
4. Sie erhalten dann einen Code per E-Mail, um sich auf der Meta-Website zu registrieren.
5. Auf der Website müssen Sie einige Informationen angeben: Passwort, Name, Geburtsdatum. Füllen Sie diese Felder aus, um Ihr Meta-Konto zu erstellen.
6. **Falls Ihr Meta VR-Headset nicht neu ist** (bereits benutzt wurde), müssen Sie es zurücksetzen:
  - Schalten Sie Ihr Headset aus
  - Drücken Sie gleichzeitig die Einschalttaste und die Taste „-“ an Ihrem Headset, bis der Startbildschirm geladen wird.
  - Verwenden Sie die Lautstärketasten an Ihrem Headset, um die Option **“Factory reset”** auszuwählen, und drücken Sie dann die Einschalttaste.
7. Nach der ersten Initialisierung **WÄHLEN SIE NICHT** „Pair your headset with the Meta Horizon App to continue“, sondern wählen Sie die Option **„Connect to your organisation“**
8. Fahren Sie mit der Ersteinrichtung fort. Die C2Care-Anwendung wird automatisch heruntergeladen und installiert. Sie können sie über das Verzeichnis „For Work“ oder „Applications“ starten
9. Ein Code wird in der C2Care-Anwendung angezeigt. Senden Sie diesen an die Adresse [support@c2.care](mailto:support@c2.care) und wir werden Ihr Headset innerhalb von 24 bis 72 Stunden aktivieren.
10. Sie sind bereit !