



## Configuration pour un casque de Réalité Virtuelle Meta Quest

Compatible pour :

- Meta Quest 2
- Meta Quest 3
- Meta Quest 3S
- Meta Quest Pro

1. Vous recevrez un email de Meta dans les **24 à 72 heures après votre souscription**. Vérifiez vos emails pour ce message.
2. Sur le mail de Meta, cliquez sur le lien **"Setup your account"**
3. Entrez votre adresse eMail.
4. Vous recevrez un code par eMail pour vous enregistrer sur le site de Meta.
5. Le site vous demandera plusieurs informations : Mot de passe, Nom, Date de naissance. Complétez ces champs pour terminer la création du compte.
6. **Si votre casque VR n'est pas neuf** (déjà utilisé) vous devrez en faire un reset :
  - Éteignez le casque
  - Appuyez sur le bouton de démarrage et le bouton volume "-" en même temps sur le casque jusqu'à ce qu'un écran s'affiche.
  - Utilisez les boutons du volume pour choisir l'option **"Factory reset"** et appuyez sur le bouton de démarrage.
7. Après la première initialisation **NE CHOISISSEZ PAS** "Pair your headset with the Meta Horizon App to continue", mais choisissez l'option **"Connect to your organisation"**
8. Continuez le setup initial. L'application C2Care sera automatiquement téléchargée et installée. Vous pourrez la lancer depuis le répertoire "For Work" ou "Applications"
9. Un code sera affiché dans l'application C2Care. Envoyez le à l'adresse [support@c2.care](mailto:support@c2.care) et nous activerons votre casque dans les 24 à 72 heures.
10. Vous êtes prêt !